

# かづき・デザインテープ®

## かづき・デザインテープとは

外観に悩みを持つ患者がメイクにより自身の外観を受容し、社会復帰することを目的とした“リハビリメイク®”において、傷跡ややけど痕などの凹凸のある症例に用いる化粧補助テープです。

総厚0.01mmの極めて薄い粘着テープで、目立ちにくく、上からメイクを施すことができます。皮膚追従性や透湿性に優れ、長時間の使用においても皮膚に負担がなく、貼っている違和感もありません。


## 構造

フィルム層 0.005mm、粘着剤層 0.005mm、総厚 0.01mm という薄さにより、貼った部分の隆起が非常に小さく、触ってもほとんど分かりません。また、柔軟性・伸縮性の高いポリウレタンフィルムを採用し、皮溝に入り込むまで皮膚になじみ、追従性にも優れています。

### かづき・デザインテープの構成




### 手背に貼付した粘着テープと皮膚の境界面

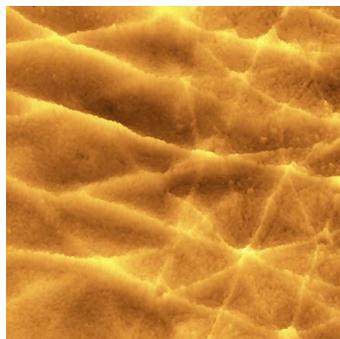

かづき・デザインテープ

(フィルム厚さ 0.005mm、粘着剤厚さ 0.005mm)

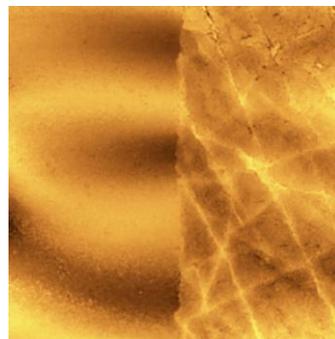

一般的な粘着テープ

(フィルム厚さ 0.025mm、粘着剤厚さ 0.025mm)


※それぞれ左半分にはテープを貼付、中央付近が貼付の境界。

## 特長


### エンボス加工

フィルムの表面にエンボス(凹凸)加工を施し、皮膚表面とよく似た光沢度のため、皮膚になじんで目立ちません。また、凹凸により化粧料がすべり落ちにくく、テープの上からでも化粧を施すことが可能です。

テープ表面の走査型電子顕微鏡(SEM)像 (300倍)

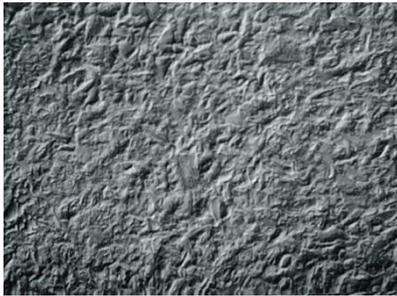

かづき・デザインテープ

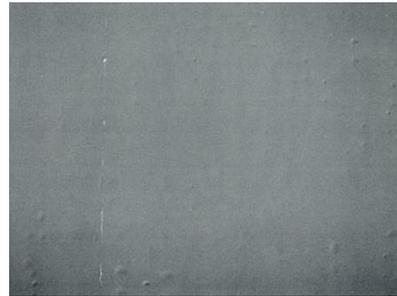

エンボス加工なしの一般的な粘着テープ  
(ニチバン社製「カテリープ®」)

### 透湿性

透湿性に優れ、ムレにくく、長時間貼っても皮膚がふやけません。

貼付材料の比較

商品名	透湿性(g/m <sup>2</sup> ・24h)
かづき・デザインテープ®	3,000~3,500
カテリープ® (ニチバン社製)	400~450
チューシャバン® (ニチバン社製)	4,000~4,500

※メーカー測定による参考値

### 低刺激

医療用粘着テープにも用いられる低刺激性のアクリル系粘着剤を使用しています。  
また本製品は、パッチテスト、アレルギーテスト、細胞毒性試験を行い、安全性を確認しています。

### 紫外線防止

光の波長 280~400nm に対して、15%以上のカット率を確認しています。

※メーカー測定による参考値

## 商品一覧

### かづき・デザインテープ規格表

品名	サイズ	入数	価格
イージータイプ	H33 × W16mm × 6 カット	8 シート	4,620 円(税込)
	H33 × W9.5mm × 10 カット	2 シート	
シートタイプ	130 × 90mm	5 シート	4,950 円(税込)
大判タイプ	270 × 170mm	5 シート	12,980 円(税込)

特許：第 4672799 号 ※類似品にご注意ください。



イージータイプ



シートタイプ



大判タイプ

### 参考文献

- 1)野町健, 清水雄介:老人性色素斑に対する Q スイッチルビーレーザー照射後の創傷被覆材用途としての超極薄粘着シートの応用. 日本形成外科学会誌, 32, 897-903, 2012
- 2)渡辺修一, 深野兼司, 藤澤博充:厚さ 10 $\mu$ m の超極薄粘着シート. コンバーテック, 443, 1-4, 2010